

ネブラーゼ ディオ NEB-02 取扱説明書(別紙)

ご使用前に必ずお読みください。

<重要>

この製品は医療機器です。

- 喉や部屋の加湿器としては使用できません。
- 医師から処方された薬液以外は使用できません。
薬液の種類、用量、用法については必ず医師の指導に従ってください。(※)
- 純水や蒸留水などを用いて吸入はしないでください。
※ 薬液の種類によっては噴霧時間が長くなる場合があります。

誤った使い方をすると、以下の事の原因となる恐れがあります。



警告

- ・ 本器の破損、重大事故
- ・ 症状の悪化
- ・ 雑菌等による感染
- ・ 漏電、感電


交換用品

製品に関する詳しい情報とその他の交換用品に関するのご案内はWebからご覧いただけます。
<https://www.nurse-angie.jp/>




交換用薬液カップ (1個入り) (NEB-02CA)

JAN : 4983621 801613

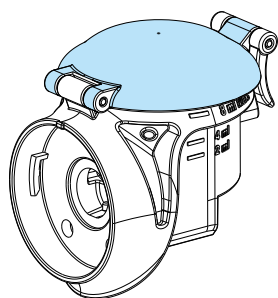

交換用メッシュモジュール (1個入り) (NEB-02SP)

JAN : 4983621 801620

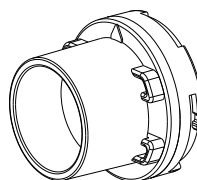


☆ メッシュモジュールは消耗品です。

噴霧が弱くなったり噴霧時間が長くなった場合は振動子(メッシュ)の目詰まりが原因です。メッシュモジュールを交換してください。使用頻度、使用する薬液、洗浄状態により交換時期は異なります。


交換用マスクセット (大人用 / 小児用 各1個) (NEB-02MK)

JAN : 4983621 801637

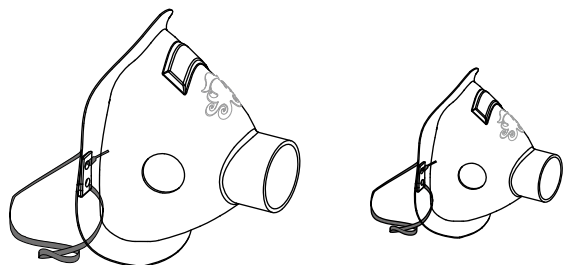

交換用マウスピース (2個入り) (NEB-02TH)

JAN : 4983621 801644

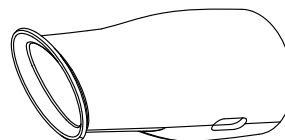






<注意>

- ・ 消耗部品(薬液カップ、メッシュモジュール、マスク、マウスピース、キャップ)については初期不良以外での返品・交換は出来ません。
- ・ ご使用後の本体部の不良品返却の際はポリ袋に入れ、密封した状態で返却願います。但し、感染を予防するため、極端に汚れた物、汚染された恐れのあるものは受付できません。ご了承願います。

ネブラーゼ ディオ NEB-02 正しくお使いいただくために


◇ こんな時は

| 症状 | LED 状態 | 考えられる原因 | 対応 |
|----------|----------------|----------------|--|
| 噴霧しない | 青点滅 | 電池残量低下 | 内蔵電池を充電してください。*  取扱説明書参照 内蔵電池の充電 |
| | オレンジ点滅 | 薬液なし | 薬液カップに薬液を入れてください。 薬液が入っている場合は電源 / 噴霧ボタンを押してください。 |
| | | メッシュに薬液が浸っていない | メッシュに薬液が浸るよう本体を前方に少し傾けてください。  取扱説明書参照 吸入する |
| | | 薬液カップ取付け不良 | 薬液カップの取付けを確認してください。  取扱説明書参照 薬液カップの取付け / 取外し |
| 噴霧が弱い | 緑点灯 | メッシュの目詰まり | 薬液カップ、メッシュモジュールを洗浄してください。  取扱説明書参照 洗浄する 解決しない場合はメッシュモジュールを交換してください。  取扱説明書参照 メッシュモジュールの交換 |
| | 緑点灯 (暗い) | 噴霧速度設定が遅い | 適切な速度に設定してください。  取扱説明書参照 噴霧速度の変更 |
| | 青点滅 | 電池残量低下 | 内蔵電池を充電してください。*  取扱説明書参照 内蔵電池の充電 |
| 噴霧が安定しない | 緑点灯 (明⇔暗繰返し) | ウェーブモード動作 | 電源 / 噴霧ボタンを 3 秒間押すと均一モードに変更できます。  取扱説明書参照 噴霧速度の変更 |
| | 青点滅 | 電池残量低下 | 内蔵電池を充電してください。*  取扱説明書参照 内蔵電池の充電 |
| 噴霧が強い | 緑点灯 (明るい) | 噴霧速度設定が速い | 適切な速度に設定してください。  取扱説明書参照 噴霧速度の変更 |
| 噴霧停止 | 緑点滅 (10 回) | オートパワーオフモード | 連続 30 分で自動停止します。続けて噴霧する場合は電源 / 噴霧ボタンを押して再スタートしてください。  取扱説明書参照 オートパワーオフ |

* 本器に内蔵しているリチウムイオン電池は交換できません。

◇ LED 状態と動作状態

| LED | 状態 | 動作内容 |
|-----------|---------------|---------------------|
| 緑色 LED | 点灯 | 均一モード |
| | 点滅 (3 回) | ウェーブモード / 均一モード切替え中 |
| | 点灯 (明⇔暗繰返し) | ウェーブモード |
| | 点滅 (10 回) | オートパワーオフ |
| 青色 LED | 点滅 (5 回) | 電池残量低下 |
| | 点滅 | 充電中 |
| | 点灯 | 充電完了 |
| オレンジ色 LED | 点滅 (10 回) | 薬液なしで停止 |

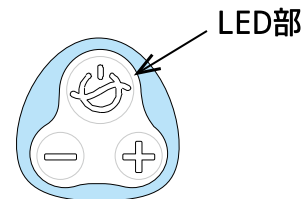

お問い合わせ窓口電話 **03-3255-1117**
 受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日を除く)

製品に関するお問い合わせは、接続後「2」番を押して下さい。
 ※ガイダンスの途中でも操作可能です。

* 詳しい使用方法、使用上の注意事項については取扱説明書をご覧ください。