



- Bluetooth機能を有するモデルは日本国内専用です。
海外には電波の使用が制限されている国があるため、
本器を使用した場合、罰せられることがあります。

Bluetoothデータ通信機能

PLS-01BTはBluetoothを用い、スマートフォンなどと接続ができます。
Bluetooth接続後、スマートフォンなどに予めインストールしたアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」と略す)により以下の操作ができます。

1. 測定値の表示、保存
酸素飽和度(SpO2)、脈拍数(PR)、灌流指数(PI)、脈波波形などがスマートフォンなどの画面上に表示されます。
測定結果はスマートフォンに保存できます。
2. 警報設定
スマートフォンなどから酸素飽和度(SpO2)、脈拍数(PR)、灌流指数(PI)の上限値、下限値が設定できます。
測定値がスマートフォンなどの設定値を超えた場合、スマートフォンは警報を発し、測定値の表示が変化します。
3. レポート、チャートの表示
スマートフォンなどに保存された測定結果をレポートやチャートでスマートフォンなどの画面上に表示できます。

Bluetooth データ通信機能 スタートガイド

この度は、当社のパルスオキシメータ(販売名：酸素飽和度メータ)をお買い求め戴きまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本紙をよくお読み戴き、正しくお使いください。
なお、お読み戴きました後も、本紙を大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

本器をご使用になる前に取扱説明書および、本紙をよくお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください



人が傷害または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

Bluetooth機器について

機器認定について

本器は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。(認証を受けたモジュールを使用しています。)

本器を使用する際に無線局の免許は必要ありませんが、本器を分解、改造して使用すると電波法に違反になる場合があります。

周波数について

他の無線機器も本器と同じ周波数を使用している場合があります。
電波干渉を防止するため、下記の事項に注意して使用してください。

Bluetooth機器を使用する際の注意事項

本器の使用周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要するアマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本器を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本器と他の無線局との間で電波干渉が発生した場合は、速やかに本器の使用場所を変えるか、機器の運用(電波の発射)を停止してください。
- 不明な点や、その他お困り事が生じた場合は取扱説明書の保証書に記載の連絡先までお問い合わせください。

2.4 X X 1

本器は2.4GHz帯を使用します。
変調方式としてGFSK変調方式を採用し、
干渉距離は10mです。

注意

- Bluetooth機能を有するモデルは航空機内で使用しないでください。
Bluetoothの電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。
- Bluetooth機能を有するモデルは医療用電気機器の近くで使用しないでください。
Bluetoothの電波が医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。
- Bluetooth機能を有するモデルは心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。
Bluetoothの電波が心臓ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。
- Bluetooth機能を有するモデルは自動ドアや火災報知機などの自動制御機器の近くでは使わないでください。
Bluetoothの電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となる恐れがあります。

仕様

項目	仕様
Bluetooth規格	Low Energy 4.0 (シングルモード)
対応OS	iOS7.0以降とAndroid4.3以降
通信距離	見通し 10m(最大) ※

※ 通信距離は機器の性能や電池残量、周囲の環境などに依存します。

注意

- 最新の情報については、弊社HPにてご確認ください。
- お客様のご使用環境により、ご利用戴けない場合やご利用内容に制限が生じる場合がありますことをご了承ください。
- お使いになる端末の種類やOSバージョンにより、画面の構成や表示が本紙と異なる場合があります。
- また、ご使用のインターネットの環境や設定により、一部機能が制限される場合があります。
- アプリの仕様および、画面は改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商標について

- Apple、Appleロゴ、iPad、iPhone、iPod touchは米国および、その他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Android および、Google playはGoogle Inc.の商標または、登録商標です。
- Bluetoothのワードマークおよび、ロゴはBluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- 上記以外の製品名、会社名は各社の登録商標または、商標です。

本スタートガイドについて

本スタートガイドの一部または、全部について写真、複写、検索システムへの保存または、他の言語への翻訳を含む電気的手段、機械的手段および、その他のいかなる方法によっても複製または、転用することを禁じます。

アプリのインストール

ご使用になられる端末をネットワーク環境に接続してから右記のQRコードまたは、
下記URLをアクセスして参照先の指示に従い
アプリをインストールしてください。



<URL>

http://www.nurse-angie.jp/support/PLS-01BT_apps.html

※アプリの起動と初期設定は裏面をご参照願います。

アプリの起動と初期設定

以下の手順にてアプリの起動と初期設定を行ってください。

1. Bluetooth 機能を有効にする

スマートフォンなどの Bluetooth 機能を有効 (ON) にして、画面上に  アイコンが表示されることを確認してください。

2. アプリを起動する

スマートフォンなどの画面に表示される「My Oximeter」アイコンをタップするとアプリが起動します。



起動後、アプリの特徴を示す画面が数ページ表示される場合がありますので、画面を先送りしてログイン画面に移動します。

画面の先送りは、画面に向かって右から左に画面上をすべらせるように指を移動すると画面の先送りができます。

● ヒント ●

ご使用になる OS により、「トレンドチャート」の画面は画面中の「体験しよう」をタップすることで画面の先送りができる場合があります。



3. メールアドレス、パスワードの入力

ログイン画面からメールアドレス、パスワードを入力します。「メールアドレス」、「パスワード」をタップすると入力用のキーボードが表示されます。

メールアドレスはお使いのスマートフォンなどの端末でご利用のアドレスを入力してください。パスワードは英数字 6～12 文字で入力してください。

メールアドレス、パスワードの入力後、「登録」をタップします。



4. メンバー（利用者）の情報入力

測定値の管理をメンバー（利用者）単位で行うため、利用者情報を入力します。「名前」、「年齢」、「性別」、「身長」、「体重」を順にタップして入力または、選択を行ってください。

全項目の入力完了後、「登録」をタップします。




5. Bluetooth 接続の準備

メンバー（利用者）情報入力後、次画面に移行すると、「Bluetooth 接続してください」が現れますので、タップします。




6. Bluetooth の接続

画面がご使用になるパルスオキシメータ PLS-01BT を検索する画面に移行します。

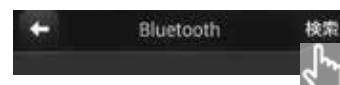

PLS-01BT に手指を入れ、電源を入れた後、画面右上の「検索」をタップします。接続する PLS-01BT (右図では My Oximeter) が現れたらタップします。

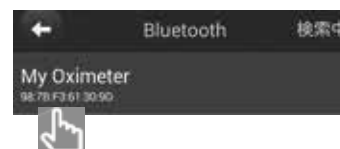

7. 測定値の表示

しばらくすると Bluetooth 接続が完了し、PLS-01BT にて測定された酸素飽和度 (SpO2)、脈拍数 (PR)、灌流指数 (PI) などが画面に表示されます。

測定値をスマートフォンなどに保存する場合は、「保存を開始」をタップします。

その後、「保存」をタップすると「保存を開始」をタップした後の測定値がスマートフォンに保存されます。



⚠ 注意

・お使いになる端末の種類やOSバージョンにより、画面の構成や表示が本紙と異なる場合があります。

● ヒント ●

・その他の操作については本紙表面記載の QR コードまたは、URL をアクセスして操作説明書をご参照願います。